

PRODUKTBESCHREIBUNG

FIX'N PRESS ist eine anatomisch geformte, aus Polyamid, Spandex und Polyester hergestellte Manschette mit komprimierenden und entstauenden Eigenschaften. Die Kompressionsmanschette dient dazu die Fließgeschwindigkeit des Blutes in den Beinen zu erhöhen, einen venösen Blutstau in den unteren Gliedmaßen zu verhindern und eine gute Zirkulation des venösen Blutes zu gewährleisten.

VERWENDUNGSZWECK

Zum festen Anlegen über Bein und Fuß zur Anwendung einer abgestuften Kompression für die Behandlung von Durchblutungsstörungen, verursacht durch venöse und/oder lymphatische Erkrankungen des Beins, bei gleichzeitiger Fixierung von verwendeten Wundauflagen.

INDIKATIONEN

Nach CEAP-Klassifikation, Druckstufe I: Geeignet für C0-C1-Patienten mit Krampfaden der unteren Gliedmaßen und Patienten mit einem ABI>0,5 (z. B. Patienten mit Ulcus cruris arteriosum oder mixtum, Teleangiectasien).

KONTRAINDIKATIONEN

1. Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes)
2. Septische Venenentzündung
3. Fortgeschrittene periphere Arteriosklerose
4. Dekompensierte Herzinsuffizienz
5. Allergien gegen Materialien

UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

Allergische Reaktion auf verwendete Materialien, Schmerzen, Taubheitsgefühl oder Missempfindung in den behandelten Extremitäten. Treten Schmerzen, Taubheitsgefühl oder Verfärbung auf, ist das Produkt sofort abzusetzen. Vor einer Weiterverwendung ist zwingend ein Arzt zu konsultieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie:

Zur Ermittlung der passenden Größe muss die Extremität vermessen werden. (Bebilderte Anleitung siehe Rückseite)

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Messen Sie den Umfang direkt über dem Knöchel am Wadenansatz (B).
2. Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Wade (C).
3. Messen Sie den Abstand von der Rückseite des Knies bis zur Unterseite der Ferse (D).

ANLEGEN DER FIXIER- UND KOMPRESSIONSMANSCHETTE

1. Führen Sie die Hand in die Manschette bis zum Fersenbereich ein. Fersenbereich fassen und Manschette von innen nach außen drehen.
2. Die Manschette über die Zehen ziehen und darauf achten, dass sich die Ferse in dem markierten Fersenbereich befindet.
3. Die Manschette über den Fuß und den Knöchel rollen und in kleinen Abschnitten vorsichtig hin und her drehen, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
4. Prüfen Sie, ob die Zehenöffnung korrekt unter dem Fußballen positioniert ist. Heben Sie die Manschette vorsichtig über die Ränder der Wundauflage (falls vorhanden).
5. Ziehen Sie die Manschette bis zum unteren Teil der Kniekehle und prüfen Sie den korrekten Sitz der Manschette und auf Faltenfreiheit.

Hinweis:

Rollen Sie Ihre Manschette beim Tragen niemals nach unten, da dies die Kompressionsleistung beeinträchtigt und zu unerwünschten Druckspitzen führen kann. Die Fixier- und Kompressionsmanschette bietet den empfohlenen Druck von 18 mm Hg am Knöchel. Nur für einen Patienten geeignet. Bitte nach dem Gebrauch entsorgen.

ANFORDERUNGEN AN DAS WASCHEN

Das Produkt kann bei einer Temperatur $\leq 40^\circ\text{C}$ per Hand gewaschen werden, solange Sie sicherstellen können, dass die medizinisch-physikalische Kompressionsstärke gewährleistet bleibt und die Gefahr einer Keimverschleppung vermieden wird. Wir empfehlen, das Produkt nicht in der Maschine zu waschen und das Produkt nach einmaligem Gebrauch zu wechseln.

LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte trocken, vor Sonneneinstrahlung geschützt und an einem gut belüfteten Ort ohne korrosive Gase transportiert und gelagert werden.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung muss gemäß den lokalen Umwelt- und Entsorgungsvorschriften erfolgen.

VERTRIEB DURCH

L+F Medizinprodukte GmbH
Adresse: Birkenweiher Straße 4, 63505 Langenselbold /Germany
Tel.: +49 6184 99 53 357 | Tel.: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de

IMPORTEUR

L+F Medizinprodukte GmbH
Adresse: Birkenweiher Straße 4, 63505 Langenselbold /Germany

HERSTELLER

Zhende Medical Co., Ltd.
Address: Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, China


EUROPÄISCHE VERTRETUNG

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adresse: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE

	Warnhinweise		Zugelassener Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Halbbarkeitsdatum		Gebrauchsanweisung beachten
	Chargennummer		Importeur
	Katalognummer		Eindeutige Produktkennung (Unique device Identifier)
	Medical device		oben / This way up
	Vor Sonneneinstrahlung schützen		Nicht steril
	Vor Nässe schützen, trocken aufbewahren		Handwäsche Temperatur $\leq 40^\circ\text{C}$
	Datum der Herstellung		Nicht bügeln
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		Nicht bleichen
	Hersteller		Nicht chemisch reinigen
	CE-Kennzeichnung, technische Konformität mit europäischen Richtlinien		Nicht im Trockner trocknen

GEBRAUCHSANWEISUNG

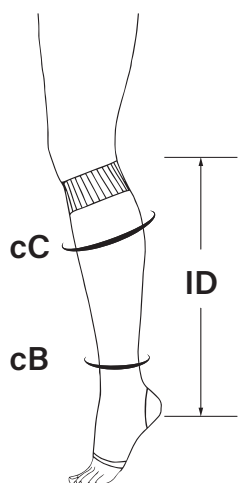

Bitte beachten Sie:


Zur Ermittlung der passenden Größe muss die Extremität vermessen werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Messen Sie den Umfang direkt über dem Knöchel am Wadenansatz (B).
2. Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Wade (C).
3. Messen Sie den Abstand von der Rückseite des Knies bis zur Unterseite der Ferse (D).

Größe		Knöchelumfang (B)	Wadenumfang (C)	Beinlänge (D)
S	(Regular)	18 - 20 cm	30 - 36 cm	39 - 44 cm
M	(Regular)	21 - 23 cm	34 - 40 cm	39 - 44 cm
L	(Regular)	23 - 25 cm	36 - 42 cm	39 - 44 cm
XL	(Regular)	26 - 29 cm	36 - 44 cm	39 - 44 cm
XXL	(Regular)	30 - 33 cm	38 - 46 cm	39 - 44 cm


ANLEGEN DER FIXIER- UND KOMPRESSIONSMANSCHETTE

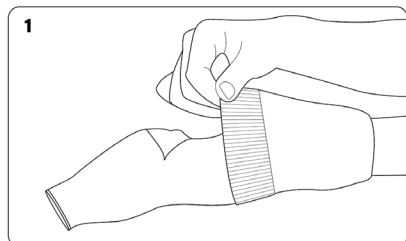


Führen Sie die Hand in die Manschette bis zum Fersenbereich ein. Fersenbereich fassen und Manschette von innen nach außen drehen.

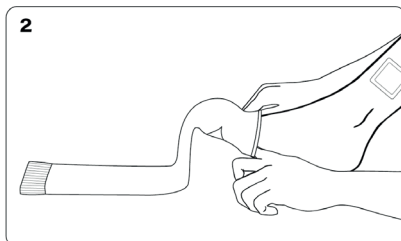


Die Manschette über die Zehen ziehen und darauf achten, dass sich die Ferse in dem markierten Fersenbereich befindet.

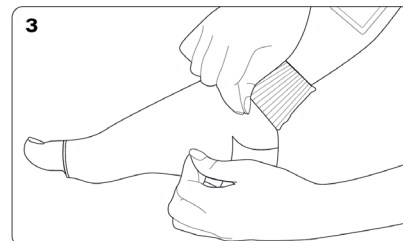

Die Manschette über den Fuß und den Knöchel rollen und in kleinen Abschnitten vorsichtig hin und her drehen, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.

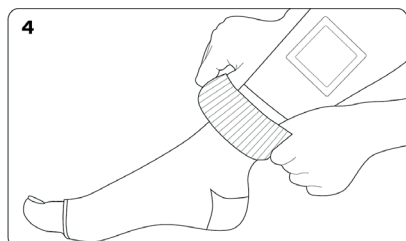

Prüfen Sie, ob die Zehenöffnung korrekt unter dem Fußballen positioniert ist. Heben Sie die Manschette vorsichtig über die Ränder der Wundauflage (falls vorhanden).

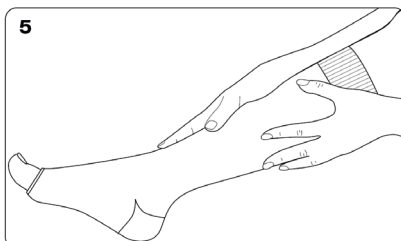

Ziehen Sie die Manschette bis zum unteren Teil der Kniekehle und prüfen Sie den korrekten Sitz der Manschette und auf Faltenfreiheit.

Hinweis:

Rollen Sie Ihre Manschette beim Tragen niemals nach unten, da dies die Kompressionsleistung beeinträchtigt und zu unerwünschten Druckspitzen führen kann.

Die Fixier- und Kompressionsmanschette bietet den empfohlenen Druck von 18 mm Hg am Knöchel.

Nur für einen Patienten geeignet.
Bitte nach dem Gebrauch entsorgen.

ANFORDERUNGEN AN DAS WASCHEN

Das Produkt kann bei einer Temperatur $\leq 40^\circ\text{C}$ per Hand gewaschen werden, solange Sie sicherstellen können, dass die medizinisch-physikalische Kompressionsstärke gewährleistet bleibt und die Gefahr einer Keimverschleppung vermieden wird. Wir empfehlen das Produkt nicht in der Maschine zu waschen und das Produkt nach einmaligem Gebrauch zu wechseln.

Handwäsche Temperatur $\leq 40^\circ\text{C}$	Nicht bügeln	Nicht bleichen	Nicht chemisch reinigen	Nicht im Trockner trocknen