

LIQUEESAP

SUPERABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE


26
2026 / 01

LIQUEESAP

Superabsorbierende Wundauflage

LIQUEESAP ist ein professioneller Einmalverband mit einer dicken, fünflagigen Struktur, der speziell für die Versorgung von Wunden mit mittlerer bis starker Exsudation entwickelt wurde. Er nimmt große Mengen Wundflüssigkeit auf und schafft ein feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Heilungsprozess der Haut optimal unterstützt. Die sorgfältig ausgewählten Materialien wirken zusammen, um die Wunde während der Tragedauer zuverlässig zu schützen und die Regeneration zu fördern.

Der Verband wurde entwickelt, um Wunden mit mittlerer bis starker Flüssigkeitsabsonderung sicher zu versorgen. Durch die hohe Absorptionsfähigkeit wird das Exsudat zuverlässig gebunden, während das feuchte Milieu erhalten bleibt.

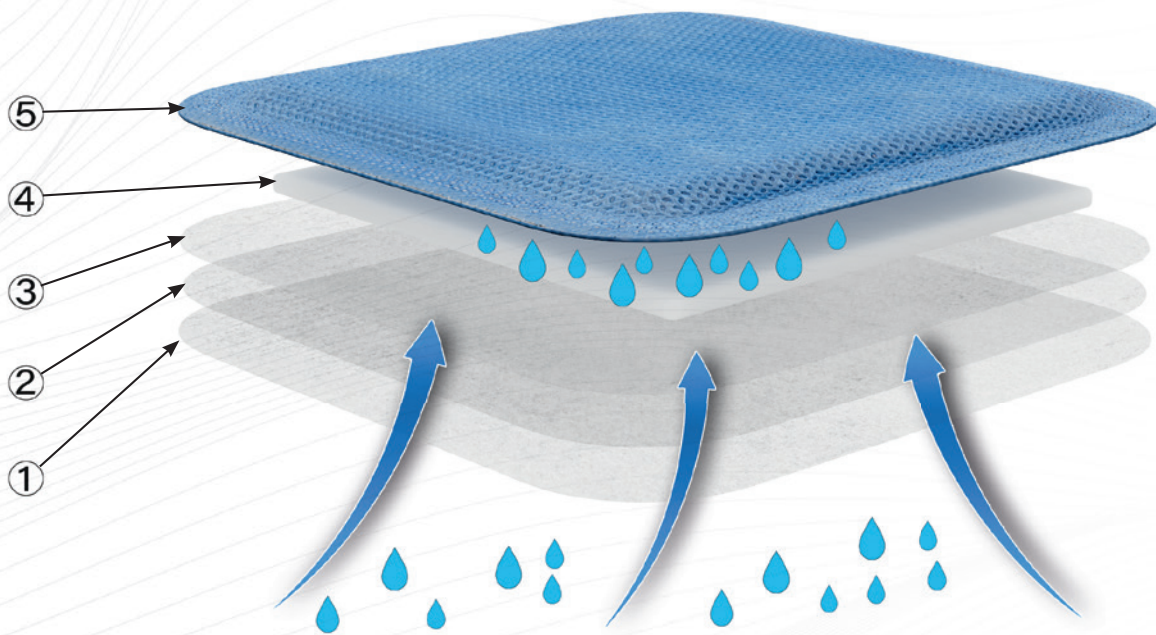

Funktionsprinzip des mehrschichtigen Aufbaus

Die spezielle Wundkontaktschicht aus einem PE/PET-Heißluftvlies [1] und einem PP-Vlies [2] leitet Flüssigkeit nach oben ab und haftet nicht an der Wunde. Die Verteilungsschicht [3] nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie gleichmäßig in den absorbierenden Kern [4]. Dieser Kern besteht aus SAP-Polymer, das eine hohe Aufnahme- und Rückhaltefähigkeit gewährleistet. Die flüssigkeitsabweisende Rückenschicht [5] verhindert ein Durchschlagen von Exsudat nach außen und ist zugleich dampfdurchlässig, um die Atmungsaktivität des Verbandes zu verbessern.

Leistungen

- ✓ Hervorragende Absorptions- und Rückhaltefähigkeit
- ✓ Minimiert das Durchschlagen von Flüssigkeit
- ✓ Unterstützung des Heilungsprozess durch hochwertige Materialkombination
- ✓ Aufnahme großer Exsudatmengen
- ✓ Sorgt für ein feuchtes Wundmilieu
- ✓ Fördert optimal die Regeneration der Haut

Exsudatmenge (E)

kein-/gering

mäßig

stark

sehr stark



Wundphase (P)

feuchte Nekrose

Fibrinbelag

Granulation

Epithelisierung

Infektion



Wundtiefe (W)

flach

tief

Kavität




LIQUEESAP

Hohe Aufnahmefähigkeit von Exsudat

LIQUEESAP ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis sehr stark exsudierenden Wunden, wie z. B. diabetische Fußgeschwüre, Druckgeschwüre, venöse und arterielle Beingeschwüre, Verbrennungen 1. und 2. Grades, postoperative und traumatische Wunden.

Die hohe Absorptionsfähigkeit von LIQUEESAP kann die Versorgung über mehrere Tage erleichtern, ohne dass der Verband häufig gewechselt werden muss. Ein feuchtes Wundmilieu wird aufrechterhalten und die Haut kann sich optimal regenerieren.

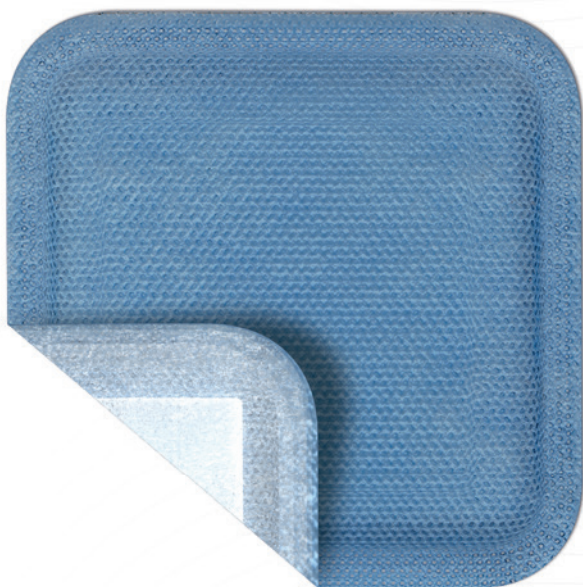

Leistungen

- ✓ Hervorragende Absorptions- und Rückhaltefähigkeit
- ✓ Minimiert das Durchschlagen von Flüssigkeit
- ✓ Unterstützung des Heilungsprozess durch hochwertige Materialkombination
- ✓ Aufnahme großer Exsudatmengen
- ✓ Sorgt für ein feuchtes Wundmilieu
- ✓ Fördert optimal die Regeneration der Haut

Indikationen

- ✓ Diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Venöse und arterielle Beingeschwüre
- ✓ Verbrennungen 1. und 2. Grades
- ✓ Postoperative Wunden
- ✓ Traumatische Wunden

Größe		Zusatzinformation	VE	PZN	REF
XXXS	7,5 cm x 7,5 cm	5 cm x 5 cm (Pad)	1 x 10	20386208	LQS-7575
XXS	10 cm x 10 cm	7,5 cm x 7,5 cm (Pad)	1 x 10	20386220	LQS-1010
XS	12,5 cm x 12,5 cm	10 cm x 10 cm (Pad)	1 x 10	20386237	LQS-1212
S	15 cm x 15 cm	12 cm x 12 cm (Pad)	1 x 10	20386243	LQS-1515
M	10 cm x 20 cm	7,5 cm x 17 cm (Pad)	1 x 10	20386266	LQS-1020
L	15 cm x 20 cm	12 cm x 17 cm (Pad)	1 x 5	20386272	LQS-1520
XL	20 cm x 20 cm	17 cm x 17 cm (Pad)	1 x 10	20386289	LQS-2020
XXL	20 cm x 30 cm	17 cm x 27 cm (Pad)	1 x 10	20386295	LQS-2030
XXXL	20 cm x 40 cm	17 cm x 27 cm (Pad)	1 x 10	20386303	LQS-2040

L+F Medizinprodukte GmbH
Am Gewerbepark 1a
63594 Hasselroth
Germany [DE]

Phone: +49 6184 99 53 357
Fax: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de
Web: www.lf-medizinprodukte.de

